

Produktinformationen

Produktnamen	
Typ	FFP2 NR
Farben	weiß
Abwendbare Standards	Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III (für komplexe Risiken) gemäß Verordnung (EU) 2016/425 geeignet für Labor- und professionelle Reinigungsarbeiten.
Einzelverpackungsmaße	16 x 14 x 18,5 cm
Haltbarkeit	Unter u.g. Bedingungen 3 Jahre
Lagerung	Trocken zwischen -30 bis +40 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Entsorgung	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes
Produktbez. Normen	EN 149:2001 + A1:2009
Qualitätszertifikate	ISO9001:2015
CE Nummer	CE0194
CE Body	INSPEC(NB:0194)56LESLIE HOUGH W AY SALFORD GREAT ER M ANCHESTER M6 6AJ UNITED KINGDOM
Hinweise	Überprüfen Sie vor Gebrauch die Atemmaske kritisch auf ihre Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch als auch nach dem Anziehen die Atemmaske auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Atemmasken auf keinen Fall verwenden! Die Atemmasken sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
Hersteller	SPRO Medical Products(Xiamen)Co.,Ltd
Adresse	No.139 Factory Bldg., TongAn GDN. TongAn Industrial Area, TongAn Xiamen, China
Telefon	0086-0592-3197888

Richtiges Anlegen der Atemschutzmaske



Maske öffnen und Nasenclip leicht zusammenbiegen, um ihn vorzuformen.



Maske mit Kopfbändern nach unten in die Hände nehmen.



Maske erst am Kinn ansetzen, danach über die Nase ziehen.



Fixierbänder vorsichtig hinter dem Kopf anbringen.



Nasenclip andrücken und Dichtsitz der Maske prüfen.

Pflege und Lagerung:

1. Die Maske nicht waschen.
2. Die Maske sollte immer nur von einer Person getragen werden. Ggf. personenbezogen markieren.
3. Lagerung: Trocken zwischen -30°C bis 40°C lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen